

SÁBANAS DESLIZANTES PATRAN[®] ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO

Las sábanas deslizantes PATRAN[®] están diseñadas para que las utilicen exclusivamente el personal de cuidado de la salud y otras personas que cuenten con capacitación profesional. Las organizaciones profesionales de cuidado de la salud y los establecimientos relacionados que compren las sábanas deslizantes PATRAN[®] deberán brindarles capacitación a todos los miembros del personal que las utilicen, incluido todo aquel que no sea empleado. La capacitación debe ajustarse a lo que establece la Ecuación de Elevación Revisada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH] ([cdc.gov/niosh/topics/safepatient/](https://www.cdc.gov/niosh/topics/safepatient/)) o a los estándares de la Manipulación Manual de Materiales de Liberty Mutual (libertymmhtables.libertymutual.com). Jamar Health Products ofrece diversos recursos de capacitación a fin de ayudar a las organizaciones profesionales de cuidado de la salud y a los establecimientos relacionados a mitigar el riesgo de que los usuarios de las sábanas deslizantes PATRAN[®] y sus pacientes sufran lesiones.



Debe utilizar una sábana deslizante PATRAN[®] por paciente a fin de evitar infecciones cruzadas. Las sábanas deslizantes PATRAN[®] pueden utilizarse varias veces con un mismo paciente.



Al movilizar a un paciente con una sábana deslizante PATRAN[®], cubra los huecos que haya entre las superficies con un ancho superior a 4 pulgadas para evitar caídas.



Mantenga las sábanas deslizantes PATRAN[®] alejadas de personas con riesgo de autoinfligirse lesiones, de niños y de animales a fin de prevenir la asfixia.



Para el transporte, coloque ropa de cama entre el paciente y la sábana deslizante PATRAN[®]. Eleve las barandillas del equipamiento y cree una cavidad levantando la cabeza y los pies.



Mantenga las sábanas deslizantes PATRAN[®] alejadas de heridas abiertas.



A fin de evitar el deslizamiento al inclinar la superficie, sujete al paciente o quite la sábana deslizante PATRAN[®].



No utilice las sábanas deslizantes PATRAN[®] para levantar a los pacientes. Haga que se deslicen con las sábanas deslizantes PATRAN[®].



Retire las sábanas deslizantes PATRAN[®] ubicadas debajo de los pacientes sin atención.



Trabe las ruedas de todo el equipamiento antes de realizar alguna tarea que involucre la movilidad o la manipulación del paciente con las sábanas deslizantes PATRAN[®].



Quite las sábanas deslizantes PATRAN[®] del suelo para evitar resbalarse.



Al movilizar a un paciente entre superficies con las sábanas deslizantes PATRAN[®], use al menos dos cuidadores.



Reemplace las sábanas deslizantes PATRAN[®] cuando estén contaminadas o pierdan su capacidad de deslizamiento.